

Cetilar[®] Tape

PHARMANUTRA

Tira adhesiva inelástica de 4 cm x 2,5 m

Para articulaciones, músculos, tendones, a base de ácidos grasos cetilados (CFAs)


INDICACIONES: Cetilar[®] Tape, es una tira adhesiva inelástica que, gracias a su formulación a base de ácidos grasos cetilados (CFAs) de origen vegetal, está indicada para el tratamiento de trastornos articulares causados por osteoartritis, para mejorar la función articular y la capacidad de movimiento y para reducir los síntomas dolorosos. Alivia rápidamente el dolor articular y musculoesquelético; es útil para la recuperación funcional durante la rehabilitación después de una inflamación o lesiones articulares; Es útil en caso de lesiones deportivas en las articulaciones para recuperar la motilidad normal.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La tira adhesiva inelástica Cetilar[®] Tape contiene una mezcla patentada de ésteres cetílicos (CFAs) de origen vegetal que, una vez aplicados en la zona dolorida, contribuye a la recuperación de la movilidad, mejorando la funcionalidad y la capacidad de movimiento. La origen lipídica de los ésteres cetílicos tiene además una acción emoliente en el área de aplicación, para prevenir la irritación en la piel. La presencia de mentol le confiere al producto una fragancia fresca y agradable a la nariz.

INGREDIENTES: Ácidos grasos cetilados de origen vegetal, copolímero de acrilato, mentol.


MODO DE EMPLEO:

SACAR

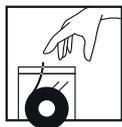

1. Abra el envase y saque la tira.

CORTAR

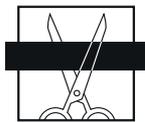

2. Corte la tira al tamaño necesario.

APLICAR



3. Asegúrese de que la piel esté limpia y seca antes de la aplicación. Presionar ligeramente sobre la piel y asegurar que los bordes se adhieren a la piel. Mantener colocado durante 8 horas.

ALMACENAR



4. Vuelva a colocar el producto no utilizado en su embalaje.

El producto se puede aplicar repetidamente a lo largo del día, dejando la piel expuesta al aire durante un corto período de tiempo entre aplicaciones para evitar la sensibilización. La tira adhesiva está diseñada para un solo uso y no se puede reutilizar.

ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Solo para uso externo. El producto solo debe aplicarse sobre la piel intacta, limpia y seca. Evite el contacto con las membranas mucosas, los ojos y la boca, si es necesario, lávese abundantemente con agua. Retire la tira adhesiva durante el baño/ducha. Si aparecen signos aparentes de irritación o hipersensibilidad al producto, suspenda su uso. No usar en caso de hipersensibilidad conocida a los componentes. No ingerir. Conservar en un lugar fresco y seco, entre 5°C y 40°C. No utilice el producto si el embalaje está dañado. No usar después de la fecha de caducidad. No use Cetilar[®] Tape al mismo tiempo que otros tratamientos tópicos en el área a tratar, sin consultar a su médico. Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico antes de usar el producto. Para uso en niños menores de 12 años, consulte a su médico antes de usar el producto.

ES - Rev. 2 de 11.23

PHARMANUTRA

PharmaNutra S.p.A.
Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa (PI)
administracion@pharmanutra.es

Lote y fecha de caducidad:
ver parte inferior del envase

Producto sanitario - Uso externo



5°C



40°C



0373



PAP

